

G-BUTON



**Tek Butonla
Konforun Sağlıkla
Gelsin**

Bizimle iletişime geçin



☎ 0312 442 95 86

✉ info@ena-med.com

NEDEN GASTRONOMİ BUTONU TERCİH EDİLMEDİLİDİR?

- Malzemenin Göbeğin dışında kalan kısmının küçük bir düğme şeklinde olması, hastanın sosyal hayatında daha rahat etmesini sağlar.
- Hastanın kıyafet giydiğinde, dış görünüşte kataterin belli olmaması yine psikolojik olarak rahatlık sağlar.
- Banyo kolaylığı sağlar. Enfeksiyon riskinin daha az olması, Hastaya ilaç veya gıda verileceği zaman kendi uzatma hattının ve şırıngalarının olması işlem kolaylığı sağlamaktadır.
- Değişim Sırasında Hastanın Endoskopi işlemine girmeden yaklaşık 5-10 dakikada kolayca takılması diğer önemli özelliğidir.



Enamed Medikal
Sağlık Hizmetleri



BIOMETRIX
CRITICAL CARE SOLUTIONS

“Her yaş için aktif bir yaşam, daha fazla hareketlilik ve özgürlük sağlar”.

www.ena-med.com.tr

Gastronomi Butonu nedir?

Gastronomi butonu,

Daha önce PEG Set (Perkütan Endoskopik Gastronomi) takılmış hastalarda değişim gerektiğinde; Özel balonlu katater sistemi sayesinde, Endoskopi işlemine gerek duymadan, perkütan işlemle, göbekten kısa bir sürede yerleştirilir. Hastanın içinde kalan kateter kısmındaki balon şişirilerek, hastaya sabitlenip, Hastadan geri çıkmaması sağlanır. PEG sete göre çok konforlu bir sistemdir. Malzemenin Göbeğin dışında kalan kısmının küçük bir düğme şeklinde olması, hastanın sosyal hayatında daha rahat etmesini sağlar.



Rahat kullanım şekli

★ En iyi performans için buton periyodik olarak değiştirilmelidir. Eğer 6 aydan uzun süre kullanılmışsa, sıklıkla performans kontrolü yapılması tavsiye edilir.

★ Stomayı her zaman kuru ve temiz tutunuz. Stoma bölgesini sıklıkla hafif bir sabun ve ılık su ile temizleyiniz. Herhangi bir enfeksiyon, tahriş ya da granülasyon belirtisi görürseniz derhal doktorunuza danışınız.

★ Her kullanım sonrası tüpü çocuklar için 5-10 ml, yetişkinler için 10-20ml su ile yıkayınız.

★ Balondaki suyun hacmini haftada bir kez kontrol ediniz. Bunu geçekleştirmek için kayan uçlu şiringayı portun ucuna takınız ve beslenme tüpünü yerinden çıkarırken miktardan daha az sıvı var ise gösterilen miktara ulaşmak için daha fazla sıvı ekleyiniz.

★ Her kullanımdan sonra beslenme setini ılık su ile yıkayınız ve durulayınız. Daha sonra hava ile kurumasına izin veriniz.

